

# BACK-FIX

## Korektor držení těla



### PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Korektor držení těla Back-Fix je vaše „osobní upozornění na držení těla“, které pomáhá posílit ramena a záda trénováním vašich svalů.

#### OBSAH BALENÍ:

1 x korektor držení těla Back-Fix

#### SPECIFIKACE PRODUKTU:

Materiál: neopren, kůže, látka

Univerzální velikost

Opravuje držení těla v horní části páteře a ramenou

Neviditelný pod oblečením: Design je diskrétní a tak o něm ani nebudete vědět, když jej budete nosit pod oblečením.

Nastavitelné zapínání

Další používání: Zpočátku začněte tím, že jej budete nosit po dobu 20–30 minut a pomalu prodlužujte čas strávený nošením o 10 minut až na hodinu denně. Po několika týdnech se vaše držení těla zlepší a poté jej noste příležitostně.

## JAK SE NOSÍ



1 Upravte korektor Back-Fix na maximální délku popruhů na suchý zip.

Noste korektor jako batoh.



3 Uvolněte popruhy a zatáhněte za ně, abyste dosáhli požadované úrovně držení těla.



Podle potřeby popruhy znovu upravte, aby vám lépe padly.

### 🔥 Pozor! 🔥

Zpočátku můžete při použití korektoru cítit určité nepohodlí nebo napětí v oblasti podpaží, protože vaše svaly se trénují na správné držení těla. Během této doby je vhodné nosit korektor na košili, která vám zakrývá podpaží. Při dalším používání bude postupně pohodlnější a ani o něm nebudete vědět.

**DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:** 20 až 60 minut denně

Účelem korektoru držení těla je udržet páteř rovnou a zmírnit bolest. Během používání můžete cítit tlak na ramena a můžete se cítit nepohodlně. Účinek se člověk od člověka liší, to je normální a na nové opravené držení těla si zvyknete za 2–4 týdny.

## POKyny PRO PÉČI

Perte ručně ve studené vodě a sušte zavěšením. Nečistěte chemicky, nežehlete ani nepoužívejte bělidlo.

## Pokyny k recyklaci a likvidaci



Tento štítek značí, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem v celé EU. Zabraňte jakémukoli poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu; buďte zodpovědní a podporujte udržitelné opětovné používání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Tento produkt lze použít k ekologické recyklaci.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.